



PROXIMA

Fauteuil de podologie

MODE D'EMPLOI



Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en choisissant les produits STERN PODIA.

Votre équipement a été conçu et réalisé pour satisfaire vos besoins actuels, et grâce aux caractéristiques du projet peut s'adapter à vos nécessités futures.

Avant la mise en fonction, nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à le conserver soigneusement. Ce mode d'emploi vous permettra de découvrir et d'exploiter au mieux le potentiel de votre équipement. Il vous permettra en plus de conserver inaltéré dans le temps toutes ses performances, de sécurité et de fiabilité.

Toutefois, sachez aussi que vous pouvez compter à tout moment sur le professionnalisme du Concessionnaire S.M.D., sur la compétence de ses techniciens et sur notre sérieux de constructeur.

Bon travail !

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS	Pag. 3
IDENTIFICATION	Pag. 4
DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET FONCTIONNEMENT	Pag. 5
WIRELESS SYSTEM	Pag. 9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	Pag. 10
PIECES DETACHEES	Pag. 10
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Pag. 11
PICTOGRAMMES	Pag. 12
DIMENSIONS	Pag. 13
DECLARATION DE CONFORMITE	Pag. 14

AVERTISSEMENTS

Emploi:

- Le fauteuil de Pédicurie Proxima est un dispositif utilisé par le Pédicure Podologue pour le soutien du patient lors d'interventions de Pédicurie et de Podologie.
- Proxima a été développé et construit pour être utilisé avec des patients des deux sexes de tous âges, avec un poids maximum de 220 kg.
- Il est destiné à être utilisé par des professionnels, spécialisés dans les traitements de Pédicurie et de Podologie, formés à l'utilisation du dispositif par personnel autorisé par le fabricant.
- Proxima est un dispositif médical de classe I.
- Il est interdit d'utiliser le fauteuil en présence de mélanges de gaz anesthésique inflammable.
- Ne pas utiliser le fauteuil avec des patients porteurs d'un cardio-stimulateur ou d'appareils similaires.
- Ne jamais dépasser les charges indiquées dans la section "Caractéristiques techniques".
- Ne jamais enlever les étiquettes qui se trouvent sur le dispositif. Les remplacer lorsqu'elles se détériorent.

Alimentation électrique :

- S'assurer que l'alimentation électrique des appareils soit bien munie d'un interrupteur magnétothermique différentiel extérieur, avec une capacité de 16 A et avec un seuil de déclenchement de 10mA.
- S'assurer que le fauteuil soit alimenté séparément.
- S'assurer que le réseau d'alimentation soit équipé d'une mise à la terre adéquate et efficace et que l'installation du système soit conforme à la législation en vigueur.

Conditions climatiques :

- Dans des conditions climatiques extrêmes (chaud, froid, humidité), après le déballage du fauteuil, on conseille d'attendre quelques heures avant l'allumage; une telle précaution permet d'éliminer la condensation éventuellement présente dans l'emballage.

Précautions de sécurité :

- Le dispositif doit être installé et mis en service conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique (CEM) contenues dans ce document.
- Les appareils de radiocommunication portables peuvent affecter le fonctionnement du dispositif.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés dans ce document afin d'assurer le maintien de la performance CEM de l'appareil.
- N'utilisez pas le dispositif à proximité d'autres appareils pour éviter les interférences mutuelles.
- **Attention** : la connexion de l'appareil à une prise multiple conduit à la création d'un système EM, et un niveau de sécurité réduit peut résulter de cette situation. En ce qui concerne les dispositions applicables au système EM, l'organisme responsable doit se référer à la législation en vigueur.
- S.M.D. peut fournir sur demande les schémas électriques, la liste des composants, les descriptions ou d'autres informations afin d'aider le personnel d'assistance technique dans les phases d'installation ou de réparation éventuelle.
- **Attention** : en cas de fissures ou de craquelures sur le câble d'alimentation ou s'il est partiellement sectionné, faire effectuer le remplacement par le personnel d'assistance technique qualifié et autorisé par S.M.D. Srl.
- **Attention** : En cas d'installations multiples dans la même chambre, il est nécessaire de différencier les codes de communication. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter al SAV. S.M.D. Srl.
- **Attention** : Ne touchez pas le fauteuil s'il n'est pas immobile.

Nettoyage et entretien

- S'assurer que la surface d'appui du fauteuil soit propre, plane et intacte.
- Garder constamment propre la base du fauteuil, afin d'éviter l'accumulation de déchets organiques à l'intérieur du carter qui pourraient dégager odeur désagréable.
- Eviter le déversement de liquides sur la base du fauteuil ; dans le cas de déversement accidentel, essuyer d'urgence.

S.M.D. décline toute responsabilité en cas de dommages dus à l'inobservation des prescriptions et des instructions contenues dans ce document.

1. IDENTIFICATION


Le fauteuil peut être identifié par la plaque d'identification du numéro de série, positionnée à l'arrière du fauteuil, où sont affichées les données techniques et d'identification du dispositif.



Toute demande d'intervention du S.A.V. ou bien de pièces détachées, doit toujours indiquer le numéro de série du fauteuil.


DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET FONCTIONNEMENT

- | | |
|---|-----------------------|
| A | Tête |
| B | Dossier |
| C | Assise |
| D | Accoudoirs |
| E | Jambières |
| F | Interrupteur ON / OFF |
| G | Bouton d'urgence |
| H | Pédale |

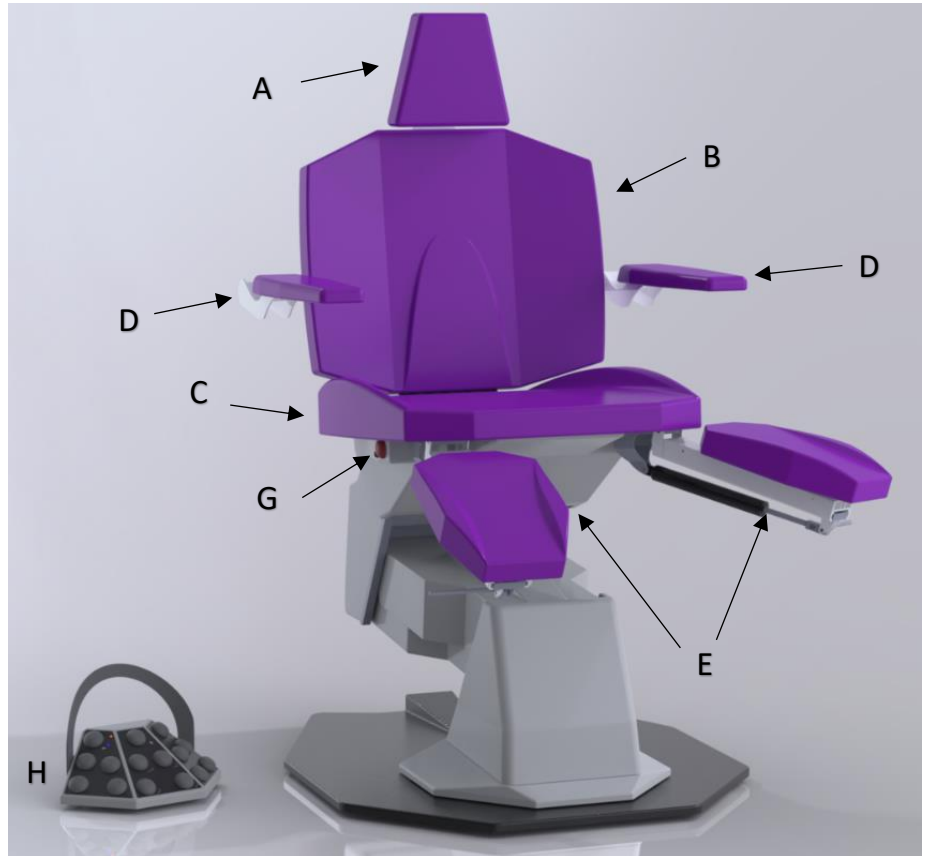

1.1. Allumage et arrêt


Après avoir branché le fauteuil au réseau électrique, à l'aide du câble approprié fourni, allumez l'interrupteur ON/OFF (F) positionné à l'arrière du fauteuil.

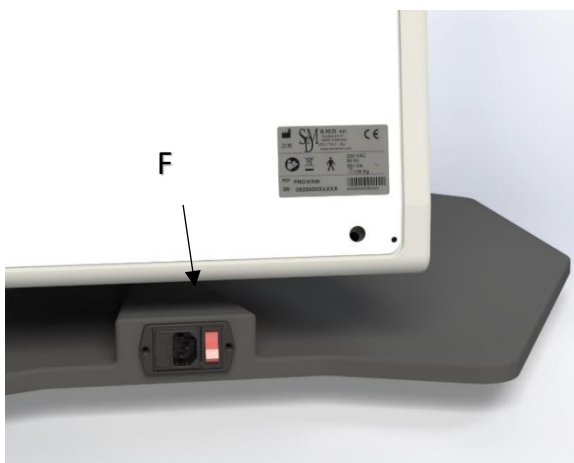

À la fin de l'emploi, arrêtez le fauteuil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF et débranchez le cordon d'alimentation du réseau électrique.

1.2. Blocage/déblocage de la rotation du fauteuil

Le fauteuil patient PROXIMA peut pivoter à 350° dans le sens horizontal.

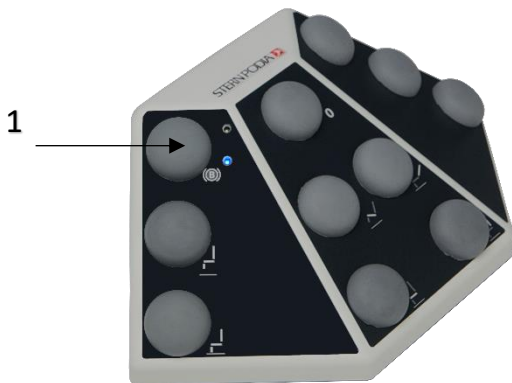

En appuyant sur le bouton de blocage/déblocage (1) de la pédale, l'opérateur peut décider de bloquer ou non le fauteuil sur sa base octogonale.

Il y a 13 positions de blocage possibles.

Lorsque le fauteuil est bloqué, le LED correspondant au bouton de blocage est orange ; dans cette condition, l'opérateur fait pivoter la chaise jusqu'à la première position de blocage disponible ; dans cette position, le fauteuil s'arrête.

Lorsque le fauteuil est libre, le LED est bleu et l'opérateur peut librement faire pivoter le fauteuil sur sa base octogonale.


1.3. Commandes automatiques

Les mouvements automatiques du fauteuil Proxima sont possibles grâce à la présence de trois moteurs, qui peuvent être activés et réglés à l'aide de la pédale (H). La pédale permet de contrôler les mouvements du fauteuil avec la fonction Single Touch. Les mouvements automatiques disponibles sont :

- Mouvement vertical
- Mouvement d'inclinaison longitudinal
- Mouvement du dossier

Mouvement vertical

En appuyant sur les boutons 2 et 3, il est possible de déplacer le fauteuil de haut en bas. Les hauteurs minimale et maximale sont celles indiquées dans les spécifications techniques.

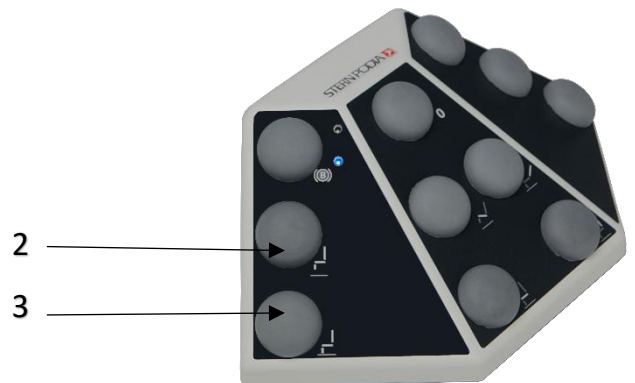

Mouvement d'inclinaison longitudinal




En appuyant sur les boutons 4 et 5, on peut atteindre l'inclinaison longitudinale ; le dossier, les accoudoirs, les jambières et l'assise se déplacent ensemble, pour atteindre la position Trendelenburg.

Attention : lors de l'exécution de ce mouvement, assurez-vous de ne pas mettre le patient dans une position inconfortable.

Mouvement du dossier

En appuyant sur les boutons 6 et 7, on peut atteindre l'inclinaison du dossier. On peut incliner le dossier entre 0° et 80°.

Attention: lors de l'exécution de ce mouvement, assurez-vous de ne pas mettre le patient dans une position inconfortable.

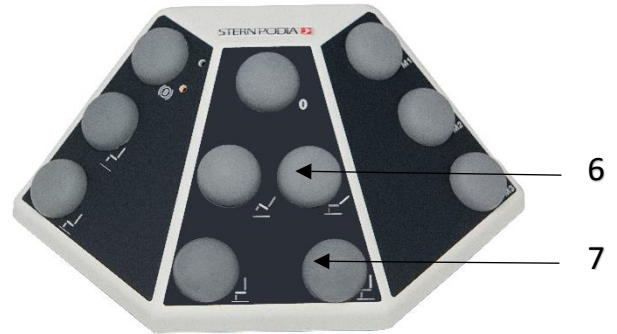

1.4. Redescente automatique



L'appui sur le bouton 0, lance le mouvement automatique du fauteuil qui rétablit la position optimale utilisée pour monter et descendre le patient du fauteuil, c'est-à-dire la configuration dans laquelle l'assise est dans sa position la plus basse, le dossier est incliné à 80° et l'inclinaison longitudinale est de 0°.

ATTENTION : cette configuration est fixée par S.M.D. Srl et ne peut pas être modifiée.

1.5. Positions mémorisées



Les boutons M1, M2, M3 permettent de mémoriser une position spécifique du fauteuil, en ce qui concerne la hauteur de l'assise, l'angle du dossier et la position longitudinale.

Après avoir placé le fauteuil dans la position de fonctionnement souhaitée, à l'aide des commandes indiquées au point 2.3, appuyez et maintenez les boutons M1, M2 ou M3 pendant environ 3 secondes.

Une mémorisation réussie s'accompagne de l'émission d'un signal acoustique.

ATTENTION : Il est possible de bloquer les mouvements automatiques du fauteuil en agissant sur n'importe quelle commande de la pédale et sur les boutons d'urgence rouges (G) situés sous l'assise



Commandes manuelles



Jambières

Les jambières sont réglables manuellement en hauteur, ouverture latérale et longueur afin d'assurer un positionnement optimal de la jambe, soit pour le patient que pour l'opérateur.

- Le réglage en hauteur se fait par un levier latéral de blocage/déblocage.
- Pour faire descendre la jambière, agir sur le levier; pour soulever la jambière, agir sur n'importe quel point de celle-ci. L'excursion du mouvement vertical est comprise entre 0° et 70°.
- Les jambières sont écartables manuellement à $\pm 30^\circ$.
- Le réglage en longueur s'effectue par un mouvement de friction longitudinal créé par un système coulissant qui garantit une excursion maximale en longueur de 350 mm.

Accoudoir

Chaque accoudoir est réglable manuellement et indépendamment.

Les accoudoirs basculent facilement, favorisant le patient lors de sa mise en place et de sa descente du fauteuil.

Proxima est un fauteuil ambidextre ; cette caractéristique permet au patient d'y accéder à la fois par l'avant et par le côté.


1.6. BOUTONS D'URGENCE

Le fauteuil de Pédicurie Proxima est équipé de deux boutons d'urgence rouges (G), positionnés latéralement sous l'assise.

En appuyant sur le bouton d'urgence, tout mouvement du fauteuil se bloque.

En appuyant sur les boutons, ils génèrent un signal sonore et bloquent les moteurs du dispositif et arrêtent tout mouvement automatique du fauteuil.

VEUILLEZ NOTER : pendant le mouvement automatique, il est également possible de bloquer le fauteuil en agissant sur n'importe quel bouton de la pédale et sur les boutons d'urgence rouges positionnés sous l'assise.

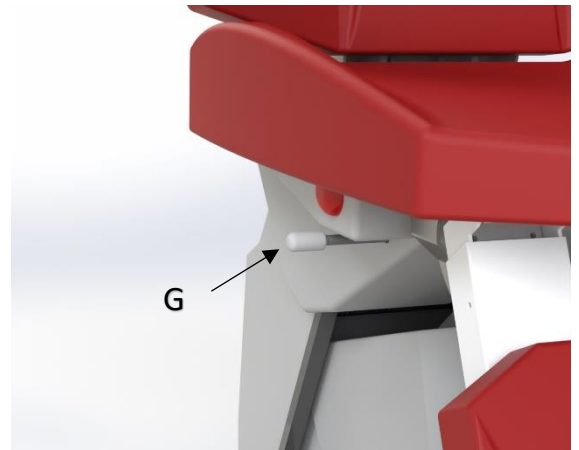

2. WIRELESS SYSTEM


Le système WIRELESS SYSTEM permet l'activation des mouvements du fauteuil Proxima sans l'utilisation du câble de connexion.

La pédale utilise des batteries rechargeables (type AA avec une puissance de 2500mA) logées dans un compartiment spécial positionné dans la base de la pédale de commande.

Les batteries garantissent une durée de vie comprise entre 2 et 7 jours selon la fréquence d'utilisation.

La pédale est déchargée lorsque le LED du bouton de blocage/déblocage (1) clignote rapidement. Les batteries peuvent être rechargées en connectant la pédale au dossier du fauteuil à l'aide du câble fourni. Le cycle de recharge des pédales dure environ huit heures.

Lorsque la pédale est en charge, le LED du bouton de blocage/déblocage (1) clignote lentement.

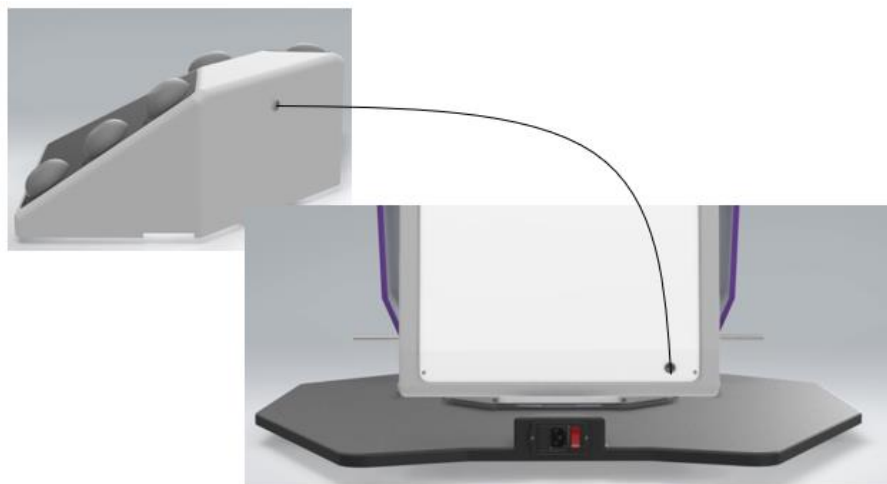

Lorsque la pédale est chargée, elle peut être détachée du fauteuil et utilisée séparément.

Cependant, il est toujours possible d'utiliser la pédale connectée à la chaise, même sans les batteries.

ATTENTION : Jetez les batteries remplacées conformément à la réglementation relative en vigueur.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer la tapisserie, utilisez un chiffon humide et du savon neutre ou des détergents désinfectants.

Ne pas appliquer de produits désinfectants sur la tapisserie pour éviter tout dommage prématuré. Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces extérieures en plastique et peintes, utiliser des produits chirurgicaux ou biocides à action bactéricide.

Appliquer les produits hygiénisants / désinfectants à l'aide d'un chiffon souple et humide: : ne vaporisez pas le produit directement sur l'équipement afin d'éviter les infiltrations qui pourraient compromettre son fonctionnement. Après avoir appliqué le produit, essuyer la surface avec un chiffon souple et humide pour éliminer tout résidu de produit.

VEUILLEZ NOTER : n'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniac, des substances abrasives ou du benzol sur la tapisserie et les pièces en plastique

VEUILLEZ NOTER : il est conseillé d'utiliser des protections jetables pour les parties en tissu du fauteuil.

Le fauteuil di Pédicurie Proxima ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est toutefois conseillé de prévoir des contrôles périodiques à effectuer par le SAV agréé.

PIECES DETACHEES






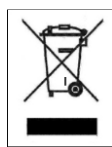
Code	Description
187595680	Sellerie tête
187595681	Sellerie dossier
187595682	Sellerie accoudoir
187595683	Sellerie assise
187595684	Sellerie jambières
456201099	Ressort à gaz jambières
	Câble d'alimentation






4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 VAC monophasé /50Hz
Tension opérationnelle	32 V
Absorption fauteuil	300 VA
Fluctuation de la tension du réseau	+/- 10%
Fusibles sur le réseau	n.1 (T.6,3A/250V)
Protection électrique	Classe 1 – Type B
Degré de protection liquides	IPX 0
Interrupteur électrique extérieur	Capacité 16A/ seuil de déclenchement 10 mA
Charge nominale à la montée	220 Kg
Charge supportée par la jambière	25 Kg
Charge supportée par l'accoudoir	35 Kg
Charge supportée par le dossier	55 Kg
Température dans le cabinet	10 ° / 35° C
Température de stockage et de transport	-10°/70°C
Degré d'humidité dans le cabinet	45/90 %
Degré d'humidité de stockage et de transport	10/95 %
Pression atmosphérique de travail	500 / 1060 mbar
Poids du fauteuil	125 Kg
Dimensions de l'emballage du fauteuil de podologie	cm 85 x 104 x 142

Les valeurs du poids sont indicatives et peuvent varier selon la configuration.

5. KEY TO SYMBOLS

Courant alternatif	
Contact de mise à terre	
Appareil de classe 1 - Type B	
Haute tension (230 V)	
Allumé (connecté au réseau d'alimentation)	I
Eteint (déconnecté du réseau d'alimentation)	O
Conformément au Règlement 745/2017 MDR	
Eliminer le produit conformément à la législation applicable. Si vous avez des questions ou des préoccupations s'il vous plaît contactez-S.M.D.	





Consulter le mode d'emploi	
ATTENTION, consulter le mode d'emploi avant toute utilisation	
Service après-vente (opération effectuée uniquement par des techniciens qualifiés)	S.P.V.
Pièce que l'on peut stériliser en autoclave	
Côté supérieur	↑↑
Fragile	
Protéger de la pluie	

Les pictogrammes qui se trouvent sur le dispositif se réfèrent à la norme IEC 60601 et la norme ISO 9687.



6. DIMENSIONS

Les dimensions sont exprimées en mm.

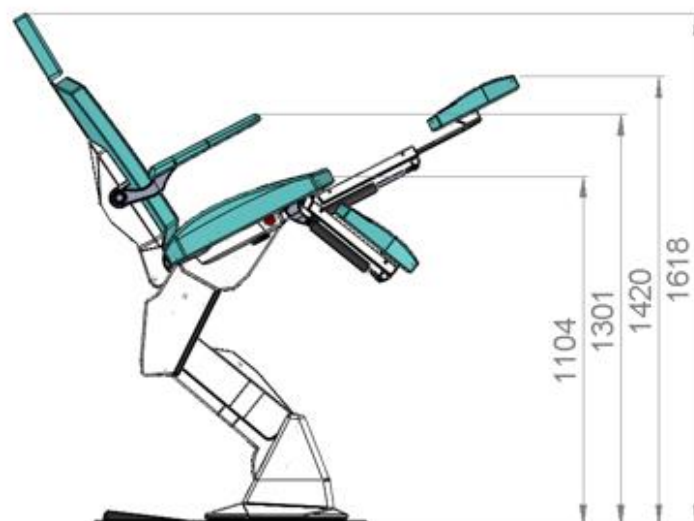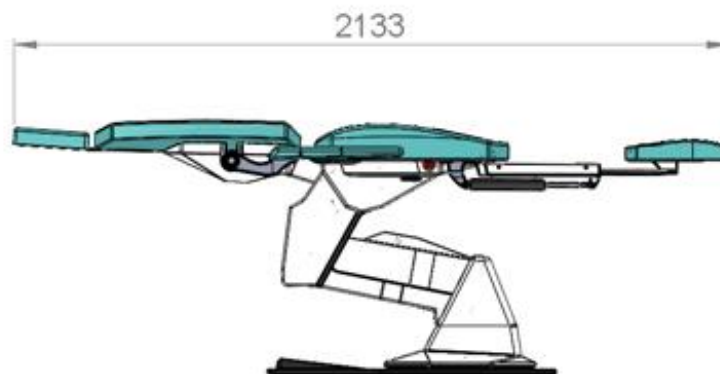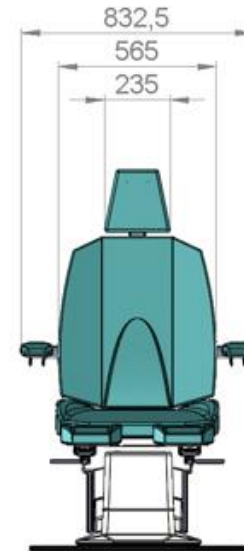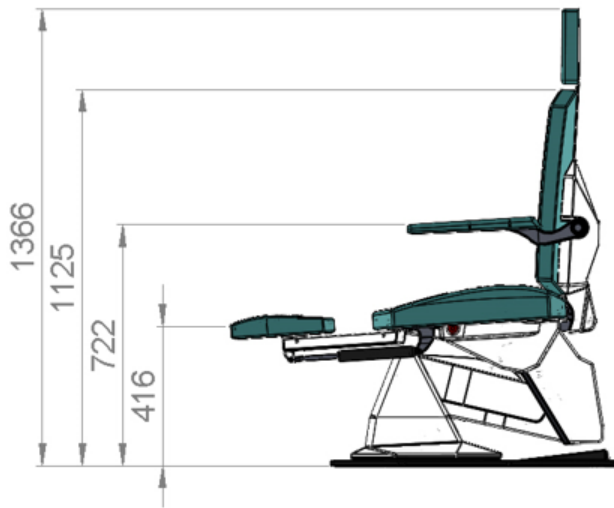

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

S.M.D. Srl, en tant que fabricant du dispositif :

Type	Modèle	Référence	No. de fabrication de ÷ a	UDI-DI
Fauteuil de Pédicurie	Proxima	3920000	3920000-00000 ÷ 3920000-99999	08058946990291
		3920010	3920010-00000 ÷ 3920010-99999	08058946990307
		3920100	3920100-00000 ÷ 3920100-99999	08058946990314
		3920110	3920110-00000 ÷ 3920110-99999	08058946990321



Emploi	Dispositif utilisé par le Pédicure Podologue pour assister le patient lors d'interventions ambulatoires.
---------------	--



Déclare, sous sa propre responsabilité,
que le dispositif faisant l'objet de cette déclaration :

- C'est un dispositif médical de classe I, selon la règle de classification numéro 13 de l'annexe VIII du règlement UE 745/2017 MDR.
- Il est conforme aux Exigences Essentielles énoncées à l'Annexe I du Règlement UE 2017/745 et à toutes ses exigences, ainsi qu'aux Normes Techniques applicables.
- Il est conforme à la directive RoHS 2011/65/CE (Restriction des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques)
- Il est conforme à la directive RED 2014/53/UE (équipement radio)

Cadriano (BO), 10/02/2023

Responsable sécurité produit		Le président	
---------------------------------	---	--------------	---